


Extraktionsset für Hüftrevisionen

Schablonengeführtes System
passend zu **Amistem** (Medacta)

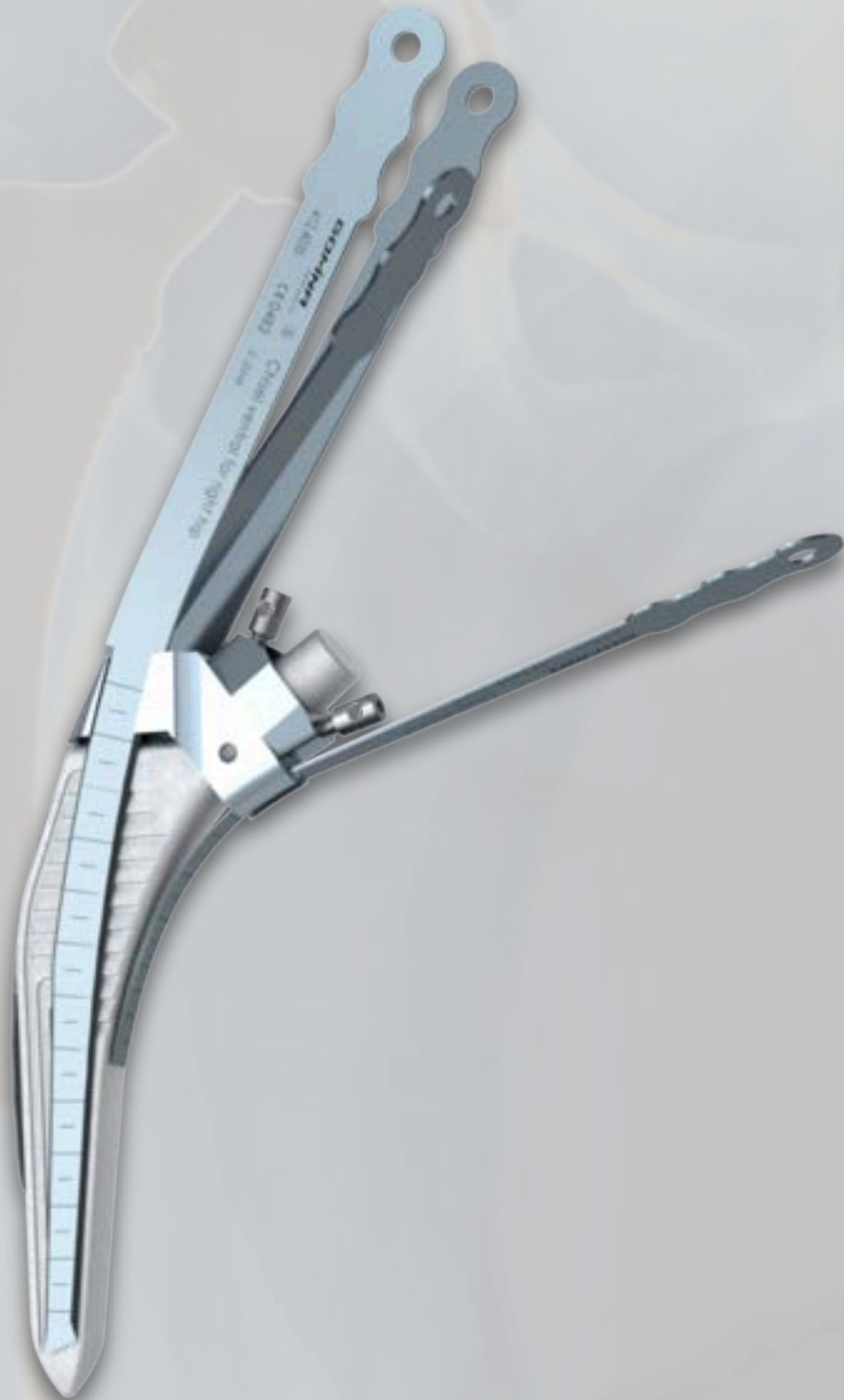

Handgriff und Ausschlagbolzen


Der Ausschlagbolzen kann an der Ober- oder Unterseite des Handgriffs befestigt werden.



Nutzlänge der Meissel

Der Handgriff mit Schnellspannvorrichtung weist drei Fixierungspositionen für die Meissel auf.

In der Einspannposition 2 wird die Nutzlänge des Meissels gegenüber der Position 1 um 15mm und in der Position 3 um weitere 15mm verlängert. Insgesamt kann die Nutzlänge von der Position 1 bis zur Position 3 um 30 mm verlängert werden.

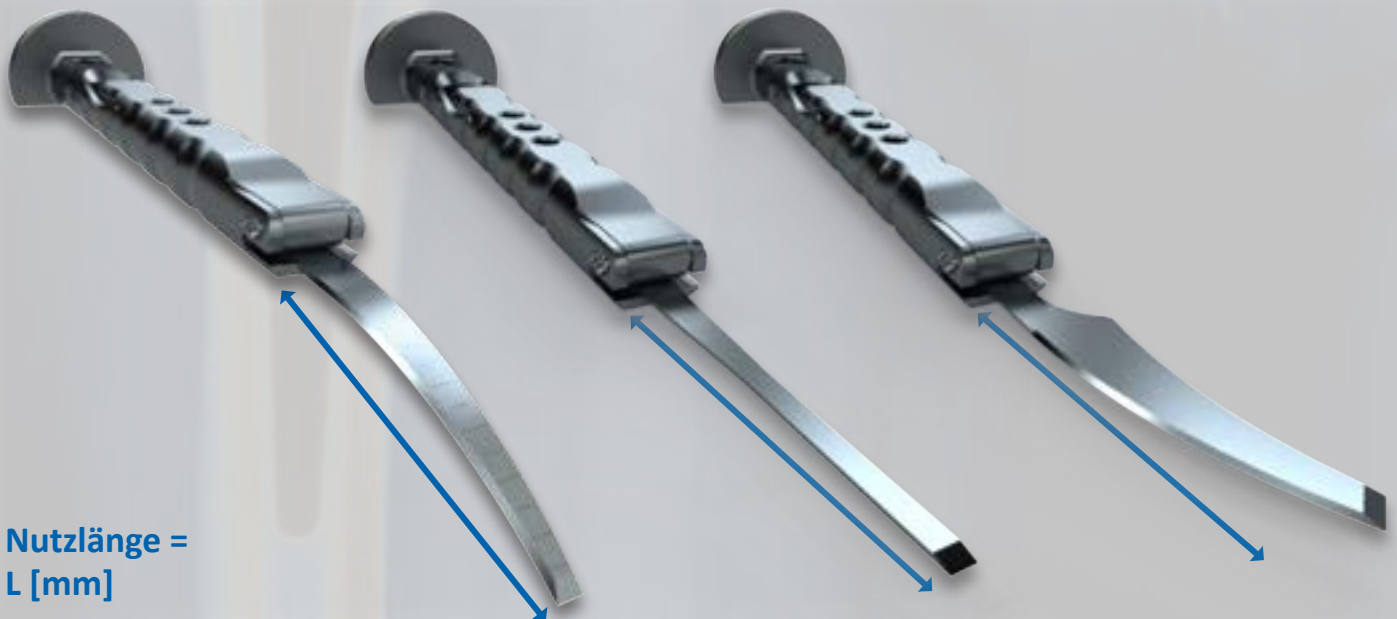

Nutzlänge =
L [mm]

Schablone

Führungsrillen

Führungsrillen




Die schablonengeführten Meissel sind auf die Führungsrillen der entsprechenden Schablonen abgestimmt. Die Meissel werden durch die Führungsrillen geführt bis die Meisselklinge direkten Knochenkontakt hat. Dann können die Meissel mit leichten Hammerschlägen eingetrieben werden.

Die Schablone wird auf den Schaftkonus gesetzt und mit den beiden Fixierschrauben befestigt.



Bei standard Schäften muss zuerst die *mediale* Fixierschraube komplett eingeschraubt werden. Danach die *laterale* Schraube einschrauben bis sie durch Kontakt mit dem Schaft die Schablone fixiert. (Bild 1)


Bei lateralisierten Schäften zuerst die *laterale* Fixierschraube komplett einschrauben. Dann die *mediale* Schraube einschrauben bis sie die Schablone fixiert. (Bild 2)

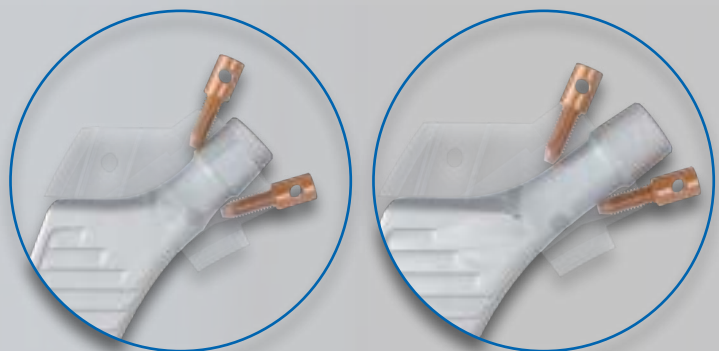

GOMINA
SWISS QUALITY


Übersicht Meissel mit Schablone

**Hinweis: die Farben dienen nur zur Veranschaulichung. Die Produkte sind nicht farblich gekennzeichnet.*

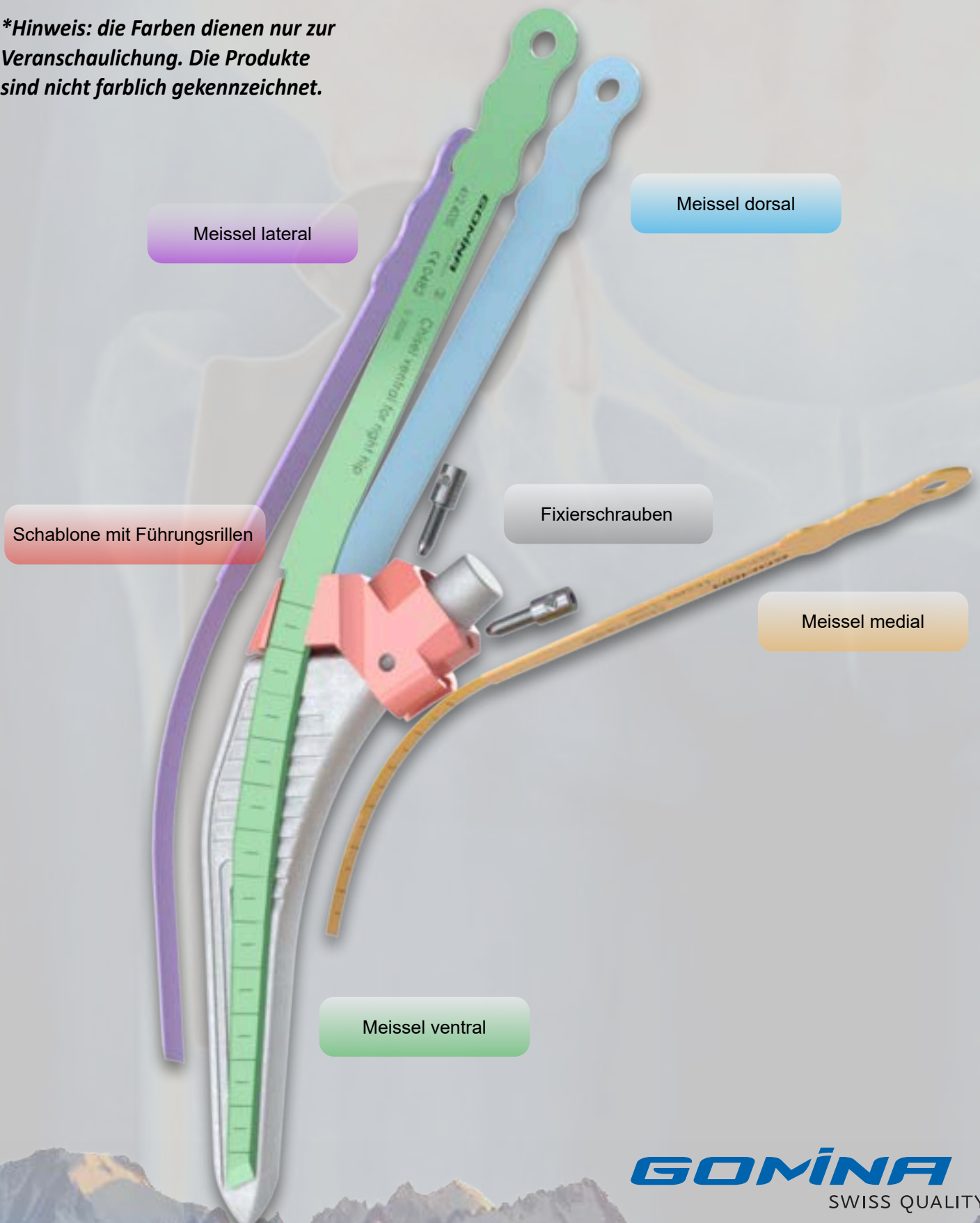


Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Amistem Schaftgrössen 0, 1

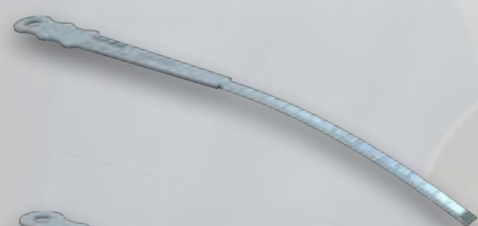

| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|


413.201S Meissel lateral 138.0 6.0 1.19

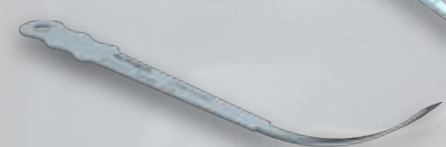

413.211S Meissel medial 105.2 5.8 1.19




412.401S Meissel ventral für rechte Hüfte 170.0 4.0 1.19

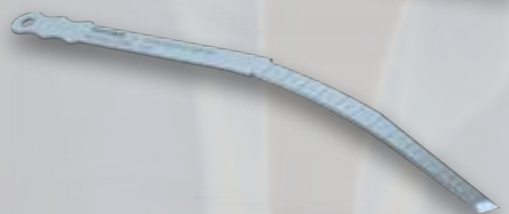

412.402S Meissel dorsal für rechte Hüfte 170.0 4.0 1.19

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|

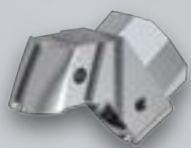

413.901 Schablone



400.101 Fixierschraube



400.106 Inbusschlüssel

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Amistem Schaftgrössen 2, 3



| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|


| | | | | |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|
| 413.202S | Meissel lateral | 137.5 | 7.8 | 1.19 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|

| | | | | |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|
| 413.211S | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|
| 412.403S | Meissel ventral für rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|

| | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|
| 412.404S | Meissel dorsal für rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|

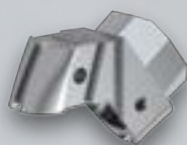

| | |
|----------------|-----------|
| 413.902 | Schablone |
|----------------|-----------|



| | |
|----------------|----------------|
| 400.101 | Fixierschraube |
|----------------|----------------|



| | |
|----------------|----------------|
| 400.106 | Inbusschlüssel |
|----------------|----------------|

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Amistem Schaftgrössen 4, 5



| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|


| | | | | |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|
| 413.203S | Meissel lateral | 143.5 | 9.0 | 1.19 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|

| | | | | |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|
| 413.211S | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|
| 412.403S | Meissel ventral für rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|

| | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|
| 412.404S | Meissel dorsal für rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|

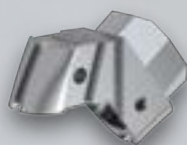

| | |
|----------------|-----------|
| 413.903 | Schablone |
|----------------|-----------|



| | |
|----------------|----------------|
| 400.101 | Fixierschraube |
|----------------|----------------|




| | |
|----------------|----------------|
| 400.106 | Inbusschlüssel |
|----------------|----------------|

GOMINA
SWISS QUALITY


Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Amistem Schaftgrössen 6, 7

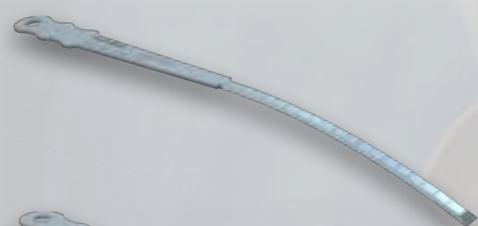

| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|

413.203S Meissel lateral 143.5 9.0 1.19

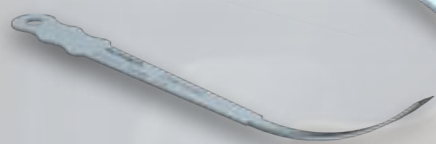

413.211S Meissel medial 105.2 5.8 1.19




412.409S Meissel ventral für rechte Hüfte 200.3 6.1 1.19



412.410S Meissel dorsal für rechte Hüfte 200.3 6.1 1.19

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|

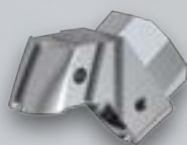

413.904 Schablone



400.101 Fixierschraube



400.106 Inbusschlüssel


Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Amistem Schaftgrössen 8, 9



| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|
| 413.203S | Meissel lateral | 143.5 | 9.0 | 1.19 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|

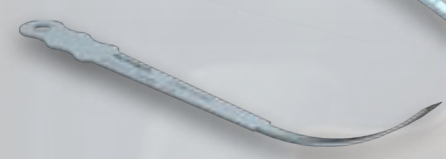

| | | | | |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|
| 413.211S | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|




| | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------|-----|------|
| 412.409S | Meissel ventral für rechte Hüfte | 200.3 | 6.1 | 1.19 |
|-----------------|----------------------------------|-------|-----|------|



| | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------|-----|------|
| 412.410S | Meissel dorsal für rechte Hüfte | 200.3 | 6.1 | 1.19 |
|-----------------|---------------------------------|-------|-----|------|

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|

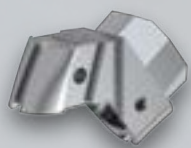

| | |
|----------------|-----------|
| 413.905 | Schablone |
|----------------|-----------|









| | |
|----------------|----------------|
| 400.101 | Fixierschraube |
|----------------|----------------|



| | |
|----------------|----------------|
| 400.106 | Inbusschlüssel |
|----------------|----------------|

Gesamtübersicht Artikelnummern

| | Amistem Schaftgrößen | Artikelnr. | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---|---|------------|---------------------------------|-----------|--------|--------|
|  | Alle Größen | 400.001 | Handgriff inkl. Ausschlagbolzen | | | |
| | Alle Größen | 400.100 | Ausschlagbolzen (Ersatzteil) | | | |
|  | 0/1 | 413.201S | Meissel lateral | 138.0 | 6.0 | 1.19 |
| | 2/3 | 413.202S | Meissel lateral | 137.5 | 7.8 | 1.19 |
| | 4/5/6/7/8/9 | 413.203S | Meissel lateral | 143.5 | 9.0 | 1.19 |
|  | Alle Größen | 413.211S | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|  | 0/1 | 412.401S | Meissel ventral rechte Hüfte | 170.0 | 4.0 | 1.19 |
| | 0/1 | 412.402S | Meissel dorsal rechte Hüfte | 170.0 | 4.0 | 1.19 |
| | 2/3/4/5 | 412.403S | Meissel ventral rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
| | 2/3/4/5 | 412.404S | Meissel dorsal rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
| | 6/7/8/9 | 412.409S | Meissel ventral rechte Hüfte | 200.3 | 6.1 | 1.19 |
| | 6/7/8/9 | 412.410S | Meissel dorsal rechte Hüfte | 200.3 | 6.1 | 1.19 |
| |  | 0/1 | 413.901 | Schablone | | |
| 2/3 | | 413.902 | Schablone | | | |
| 4/5 | | 413.903 | Schablone | | | |
| 6/7 | | 413.904 | Schablone | | | |
| 8/9 | | 413.905 | Schablone | | | |
|  | Alle Größen | 400.101 | Fixierschraube | | | |
| | Alle Größen | 400.106 | Inbusschlüssel | | | |



Kontakt



Gomina AG
Raiftstrasse 4
3989 Niederwald, Schweiz
Tel. +41 27 970 12 70
Fax +41 27 970 12 75
www.gomina.ch
sales@gomina.ch



GOMINA Deutschland GmbH
Ludwig-Vierling-Strasse 7
89233 Neu-Ulm, Deutschland
info@gomina.de

Version 2024-03
Zuletzt aktualisiert: 31.08.2024

Offizieller Distributor für Deutschland:

Cumos GmbH

Hexentalstraße 4
79249 Merzhausen
Tel. +49 761 8885704-0
Fax +49 761 8885704-9
info@cumos.de
www.cumos.de

cumos[®] PRECISE
MEDICAL
DEVICES

GOMINA
SWISS QUALITY